

CONSIGNES D'UTILISATION DES MASQUES ANTI-PROJECTIONS DITS « CHIRURGICAUX »

CONTEXTE

Le port d'un tel masque permet de réduire la diffusion des particules potentiellement infectieuses et protège les personnes et l'environnement.

Il est réservé aux personnes malades et aux personnes contacts des personnes à risque modéré/élevé. L'usage à titre préventif pour les personnes n'étant pas en contact rapproché des malades est inutile. Le port de ce masque en service courant par un personnel asymptomatique est donc exclu.

BONNES PRATIQUES D'UTILISATION DU MASQUE

1. Consulter les notices d'emploi fournies par les fabricants ;
2. Ajuster le masque ou appareil de protection respiratoire en respectant le sens (présenter à l'extérieur la mention imprimée sur le masque ; en l'absence d'indication spécifique, appliquer la partie la plus rembourrée sur le visage) ;
3. Déplier complètement le masque ;
4. Mettre en place correctement le masque ;
5. Placer les élastiques conformément au schéma ci-après ;
6. Ajuster et serrer le pince-nez ;
7. Bien emboîter le masque sous le menton ;
8. Contrôler que les liens soient être serrés et les élastiques bien en place ;
9. Vérifier que le masque est bien ajusté ;
10. Obturer la surface filtrante avec les mains ;
11. Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à s'écraser (s'il est possible d'inhaler facilement, le masque fuit) ;
12. Une fois en place, ne pas manipuler le masque ou l'appareil de protection respiratoire car il existe un risque de détérioration de celui-ci et de contamination des mains.

RETRAIT DU MASQUE

1. Se laver les mains ou friction hydro-alcoolique ;
2. Enlever le masque ;
3. L'éliminer dans la filière des Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) en cas de contamination avérée ;
4. Se laver les mains ou friction hydro-alcoolique.

CHANGEMENT DU MASQUE

- Au moins toutes les 3 heures, en cas de port de longue durée ;
- En cas de souillure, de projection ;
- S'il a été touché et/ou baissé au niveau du cou.

2020_03_16

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :



Se laver les mains
très régulièrement



Tousser ou éternuer
dans son coude



Utiliser des mouchoirs
à usage unique



Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades



Porter un masque quand
on est malade

CONSIGNES D'UTILISATION DES MASQUES ANTI-PROJECTIONS DITS « CHIRURGICAUX »

ILLUSTRATION



1/8

Avant d'appliquer le masque chirurgical, pré pliez la visière au niveau des bords pour garantir une protection maximale contre les éclaboussures latérales susceptibles d'entrer en contact avec les yeux.



Pré formez le pince-nez.



Tirez le masque en saisissant les parties supérieure et inférieure afin de déplier entièrement le plissé du masque chirurgical.



1/7

Pré formez le pince-nez. Placez le masque chirurgical sur votre visage en veillant à recouvrir votre nez et votre bouche.



Positionnez les cordons à nouer supérieurs au niveau du sommet de votre crâne et nouez-les fermement pour minimiser le passage de l'air.



Positionnez les cordons à nouer inférieurs au niveau de votre nuque et nouez-les.




1/5

Passez vos doigts à travers les boucles auriculaires. Le pince-nez doit être orienté vers le haut. Placez le masque en recouvrant votre nez et votre bouche.



Positionnez les boucles auriculaires autour des oreilles. Tirez le masque en saisissant les parties supérieure et inférieure afin de déplier entièrement le plissé du masque chirurgical. Vous recouvrirez ainsi votre visage de manière optimale et minimiserez le nombre de couches à travers lesquelles vous devez respirer.

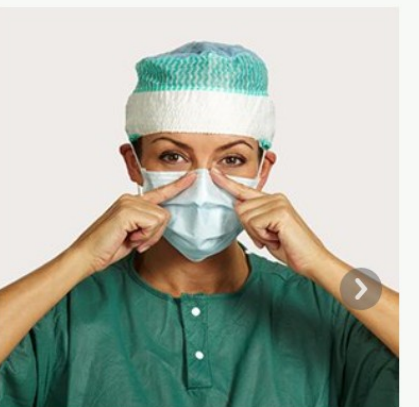

Formez le pince-nez sur le pont du nez pour minimiser le passage de l'air.